

IRIGASTON es un producto sanitario destinado a la preparación de una solución para lavado nasal y sinusal. El set consta de un irrigador en forma de frasco blando con aplicador ergonómico y 12 sobres.

IRIGASTON permite preparar tanto soluciones isotónicas como hipertónicas, según las necesidades del paciente.

Indicaciones:

La solución isotónica de cloruro de sodio limpia las cavidades nasales de secreciones residuales, bacterias, virus y alérgenos, y proporciona cuidados para la nariz y los senos paranasales en caso de:

- sinusitis aguda o crónica,
- rinitis en el curso de una infección o alergia,
- antes y después de la cirugía nasal y de los senos paranasales,
- después de la exposición a altas concentraciones de polvo en el aire,
- profilácticamente para mantener una adecuada higiene nasal y sinusal.

Una ventaja adicional de la solución isotónica es su efecto hidratante sobre la mucosa nasal que puede estar reseca como resultado del uso prolongado de medicamentos nasales o como consecuencia de la estancia en habitaciones climatizadas o sobrecalentadas.

La solución hipertónica de cloruro de sodio, además de sus propiedades limpiadoras, debido a la mayor concentración del principio activo, también tiene propiedades osmóticas, gracias a las cuales reduce la inflamación de la mucosa. Por lo tanto, se recomienda para la inflamación nasal que acompaña a la rinitis en el curso de infecciones o alergias (fiebre del heno), así como para la sinusitis.

Cómo utilizar el producto sanitario:

Adultos y niños mayores de 4 años:

Los lavados nasales y sinusales, deben realizarse de 1 a 2 veces al día o según las indicaciones de su médico.

Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

Consulte a un médico antes de usar este producto en niños menores de 4 años.

- Para preparar la solución isotónica, vierta 1 sobre de polvo en el frasco y luego llénelo hasta la línea marcada (240 ml) con agua hervida y enfriada.
- Para preparar la solución hipertónica, vierta 2 sobres de polvo en el frasco y luego llénelo hasta la línea marcada (240 ml) con agua hervida y enfriada.

Utilice únicamente el frasco incluido en el envase. No lo use si el frasco está dañado. Prepare una solución nueva para cada lavado.

El producto puede ser utilizado por mujeres embarazadas y durante la lactancia. El producto no afecta la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Composición: Cloruro de sodio.

Advertencias especiales y precauciones recomendadas:

No usar en caso de hipersensibilidad al cloruro de sodio. Si los síntomas que acompañan a la rinitis o la sinusitis empeoran, consulte a un médico. No lo use si la nariz está completamente bloqueada, evitando que la solución se escape. No lo use si tiene una infección o una sensación de taponamiento en los oídos. Si ha tenido una cirugía de oídos, consulte a su médico antes de usar el producto.

Una vez finalizada la irrigación, puede producirse una ligera fuga de solución residual de la nariz al inclinarse. No lo use más tarde de una hora antes de acostarse. No se recueste durante una hora inmediatamente después de la irrigación para evitar que la solución residual entre en el oído.

Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto. El uso en niños menores de 4 años debe consultarse con un médico.

Cómo realizar el riego: Lea el prospecto antes de usar.




Prepare la solución de lavado: vierta el contenido de 1 o 2 sobres de polvo en el frasco adjunto y luego llénelo hasta la línea marcada (240 ml) con agua hervida y enfriada.



Tape bien el frasco, cubra la abertura del tapón con el dedo y agite hasta que la sustancia se disuelva por completo.



Póngase en una posición ligeramente reclinada sobre el fregadero. Respire libremente. Coloque la punta del frasco contra una de sus fosas nasales.

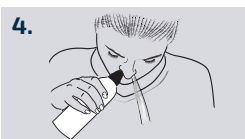

Presione el frasco con un movimiento suave para que la solución entre en su nariz. Respire con calma y la solución saldrá por la otra fosa nasal. No trague la solución si le llega a la garganta. Repita lo mismo en la otra fosa nasal.



Después del lavado, suénese la nariz suavemente.



Deseche la solución no utilizada y lave y seque bien el frasco y la tapa.

Lugar y condiciones de almacenamiento:



Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar en envase original. Proteger de la luz y la humedad. Preste atención a mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento. No use el producto después de la fecha de caducidad.

Fecha de la edición de las instrucciones de uso: 02/2025

Presentaciones disponibles del producto sanitario IRIGASTON:

- Set de lavado nasal y sinusal - 12 sobres de polvo para preparar una solución de lavado nasal y sinusal irrigador en forma de frasco blando (240 ml) con un aplicador ergonómico para una aplicación cómoda y eficaz de la solución en la nariz.
- Estuche de recarga para lavado nasal y sinusal - 30 sobres de polvo para preparar la solución de lavado nasal y sinusal.

Símbolos de impresión en el embalaje



número de lote



fecha de caducidad



consultar las instrucciones de uso



límite de temperaturas de almacenamiento permitidas



fabricante